


Estimulación transcutánea de músculos y nervios


- Electrodo flexible
- Estimulación precisa sin necesidad de rasurar

PT-2010 N Animal


Encendido / Intensidad



Conector electrodos

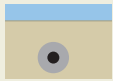


Electrodos
Usar únicamente con PT-2010 N
Uso exclusivo en animales




Programas

- 1. Codo
- 2. Hombros
- 3. Espalda
- 4. Lumbar
- 5. Extremidades
- 6. Cuello

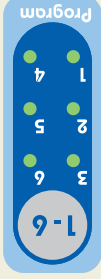

Programas Manuales

- D Vibración
- C Amasar Rampa arriba / relajación
- B Amasar Rampa arriba / abajo
- A Martilleo

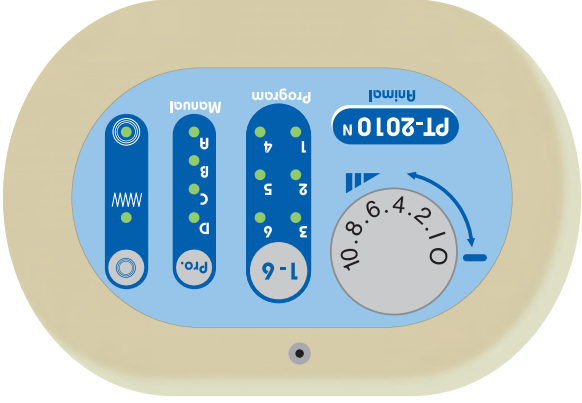

Especificaciones técnicas

Polaridad del pulso alternada automática
Duración del pulso 300 μ s
Impedancia 500 Ω

(sólo con los electrodos originales)

Programa 1	62 \pm 12 VMax. 8,0 \pm 1,5 mAMax 3 - 100Hz
Programa 2	61 \pm 13 VMax. 8,0 \pm 1,5 mAMax 3 - 100Hz
Programa 3	55 \pm 11 VMax. 8,0 \pm 1,5 mAMax 50 - 1200Hz
Programa 4	62 \pm 12 VMax. 8,0 \pm 1,5 mAMax 40 - 1200Hz
Programa 5	61 \pm 13 VMax. 8,0 \pm 1,5 mAMax 3 - 120Hz
Programa 6	61 \pm 13 VMax. 8,0 \pm 1,5 mAMax 3 - 100Hz

Manual A	61 \pm 13 VMax. 3,0 \pm 0,7 mAMax 3 - 5Hz
Manual B	62 \pm 12 VMax. 6,5 \pm 1,3 mAMax 40Hz
Manual C	52 \pm 11 VMax. 5,5 \pm 1,2 mAMax 50Hz
Manual D	40 \pm 7 VMax. 8,0 \pm 1,5 mAMax 100Hz

Tiempo de Tratamiento: 15 min. Autopagado aprox.

A los 15 minutos de empezar la sesión.



Girar el selector Encendido / Intensidad a (0)

Electrodos no conectados: Si se pone en funcionamiento sin los electrodos o sin contacto con la piel, el equipo se apagará automáticamente a los 30 segundos.

Consejos

Precalentar la zona de tratamiento mediante la bolsa térmica (micro ondas o agua caliente). Recomendable pero no imprescindible

Humedecer ligeramente la zona a tratar sin empapar (usar alcohol o agua)

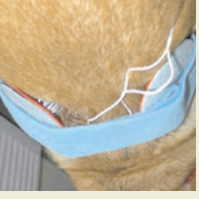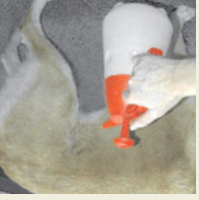

Colocar los electrodos a lo largo del grupo muscular (estimulación muscular). También pueden colocarse como muestra la imagen a ambos lados de la columna (tratamiento de la columna y tratamiento segmental) y a ambos lados de una articulación

La cinta elástica Velcro permite la colocación particular de los electrodos incluso en áreas difíciles como el hombro.

Contraindicaciones

- Heridas abiertas / inflamación
- aguda de la zona de tratamiento
- Gestación
- Tumores Malignos